

Routing voor sterilisatie van SBT naar S&LM/ACTA

S&LM komt 4 x per dag (rond 10.30, 12.45, 15.00 en 16.30 uur) het vuile instrumentarium ophalen. Graag zoveel mogelijk vuil instrumentarium meegeven op deze momenten. Dit om te voorkomen dat er tussen de middag en aan het einde van de werkdag de meeste instrumenten worden aangeboden.

Labels

Gebruik de juiste labels op de korfjes met vuil instrumentarium:

- **DES:** gebruik deze voor instrumentarium die voor controles of conserverende behandelingen worden gebruikt;
- **Steriel:** gebruik deze voor instrumentarium die subgingivaal worden gebruikt, bijvoorbeeld scalers;
- **Verpakt/Laminaat:** gebruik deze voor instrumentarium die worden gebruikt voor bijvoorbeeld extracties. Instrumenten niet afspoelen, tangen en schaartjes etc. "open" in korfje doen.

Belangrijk

Korfjes niet te vol doen.

Hoekstukken en cavitrons in apart korfje doen: vooraf met alcohol afnemen.

Tussendoor hoekstukken op kartonnen tray naar de afd. ster brengen om te kunnen steriliseren zodat het niet te veel oploopt.

Sealzakjes in blauwe bak bovenop de kast aanleveren. Met stift aangeven dat het om iets van SBT gaat en van welke behandelaar het is, of om welk type implantaat het gaat.

voor degene die op afsluiten staat : het vuile instelapparatuur van de röntgen kamers MFP en A&G in een korfje doen (staan bovenop de vuile kar) en in de kar zetten

Schone kar

Schone kar na het uitruimen altijd terug brengen naar de afdeling S&LM.