

Werkinstructie autoclaaf

Doel: steriliseren instrumentarium

Tijdens de werkzaamheden in de sterilisatieruimte is de deur naar de consult/behandelkamer **altijd** gesloten. De deur naar de gang is zoveel mogelijk gesloten. Tijdens het laden en ontladen van de thermodesinfector en bij gebruik van het trilbad is de autoclaaf **altijd** gesloten.

Dit om herbesmetting van gesteriliseerd instrumentarium te voorkomen.

- Zet de autoclaaf aan met de zwarte schakelaar aan de rechter zijkant van het apparaat
- Het apparaat heeft tijd nodig om op te warmen, gedurende de dag blijft het apparaat aan met de deur dicht
- Laad en ontlad het apparaat alleen als de thermo desinfector gesloten is. Dit om herbesmetting van gesteriliseerd instrumentarium te voorkomen
- De binnenkant van het apparaat is heet, let daarop met in en uit laden van het instrumentarium
- Laad het apparaat met ingepakt instrumentarium zo dat sets en zakjes niet op elkaar leggen. Sealzakjes worden met de papieren kant naar beneden neergelegd.
- Voeg iedere cyclus de helixtest toe met daarin een nieuwe teststrip
- Sluit de deur door zachte druk uit te oefenen
- Draai het universele programma op 143', START
- Open aan het einde van het programma de deur met het icoontje midden-rechtsonder
- Leeg het apparaat. Let op! Het instrumentarium kan nog heet zijn. Denk aan het sluiten van de thermodesinfector
- Controleer of alle verpakkingen droog en heel zijn en of de kleuren zijn omgeslagen
- Geef akkoord op de machine
- Open de helixtest en controleer de strip. Plak de strip in het logboek
- Voorzie het gesteriliseerde instrumentarium van een datumstikker met lognummer van de gedraaide cyclus en plak de desbetreffende kleurstikker (zie overzicht maandcontrole sterilititeit)
- Ruim het instrumentarium volgens het FiFo systeem op

De autoclaaf wordt maandelijks uitgelezen en het slot van de autoclaaf wordt maandelijks voorzien van een druppel olie in het slot. Verantwoordelijk: PvW

Bij het signaal 'filters vervangen' worden de volgende handelingen uitgevoerd

- De filters en het waterreservoir bevinden zich in het kastje onder de autoclaaf

- Draai de kraan dicht
- Draai met behulp van de ring die in het kastje ligt de filters uit de houder
- Verwijder het filter en maak de huls schoon
- Plaats de nieuwe filter en draai de huls op de houder aan de wand
- Draai vervolgens de deksel van het waterreservoir. Leeg het reservoir. Dop er weer op.
- Draai de kraan weer open
- De autoclaaf zal zich automatisch vullen.

Schone filters zijn ten aller tijden aanwezig zodat het proces doorgang kan vinden.

Verantwoordelijk: PvW

De volledige beschrijving van het apparaat bevindt zich in de sterilisatie ruimte aan de schone kant onder de Melagseal in de onderste lade rechts