

Werkinstructie thermodesinfector

Doel: het reinigen van het instrumentarium in de thermodesinfector , verpakken en steriliseren.

Draag tijdens het proces altijd handschoenen en een halterschoort en draag een (bescherm)bril.

Tijdens de werkzaamheden in de sterilisatieruimte is de deur naar de consult/behandelkamer **altijd** gesloten. De deur naar de gang is zoveel mogelijk gesloten. Tijdens het laden en ontladen van de thermodesinfector en bij gebruik van het trilbad is de autoclaaf **altijd** gesloten.

Dit om herbesmetting van gesteriliseerd instrumentarium te voorkomen.

- Controleer de binnengekomen sets op achtergebleven scherp. Verwijder eventueel achtergebleven scherp en maak een MIP melding. (zie apart protocol MIP melding)
- Controleer het losse instrumentarium op achtergebleven resten van elementen en of cement.
- Controleer de standaard set of deze compleet is
- De hechtschaar, de klem en het schaarje gaan samen met de ernstig vervuilde instrumenten in het trilbad, en daarna 'open' terug in de set
- Zet de sets naast elkaar in de thermodesinfector. Het losse instrumentarium gaat in de daarvoor bestemde grote mand.
- Tril ook de boortjes in het trilbad en reinig deze indien nodig met het borenborsteltje. Laat geen zichtbaar vuil achter. De boren gaan daarna in het daarvoor bestemde korfje in de vaatwasser
- Draai de vaatwasser op programma 1 (zie apart protocol vaatwasser)
- Na het proces in de vaatwasser worden de extractietangen en ander chirurgisch instrumentarium verpakt in sealzakjes. Maak de boren-setjes compleet en seal in. (Zie apart protocol seal apparaat)
- De standaard sets worden verpakt in het daarvoor bestemde crêpepapier. Plak dicht met sterilisatie tape.
- Maak de thermodesinfector altijd direct geheel leeg en schuif het bordje op 'vuil' sluit de thermodesinfector.
- Het losse instrumentarium en de standaard sets gaan in de autoclaaf op programma 134' (zie apart protocol 'werkinstructie autoclaaf')
- Na het proces in de autoclaaf worden de sets en het instrumentarium voorzien van een datumsticker en een maand-kleur-sticker. Vervolgens opgeruimd op de daarvoor bestemde plek.

Bijvullen thermodesinfector

- Zodra het apparaat aangeeft dat er zout, naspoel of zeep bijgevoeld moet worden, wordt de handeling uitgevoerd.
- Voor het bijvullen van zout open je het daarvoor bestemde bakje. De deur van de vaatwasser blijft half open staan. Vul het zout bij zover totdat je het blijft zien. Let op dat er geen

zoutkorrels in de machine terecht komen. Dit geeft onherroepelijk een storing. Na het bijvullen wordt het bakje gesloten en de machine op programma op programma 2 gedraaid

- Voor het bijvullen van naspoelmiddel open je de desbetreffende dop. De deur van de vaatwasser wordt geheel geopend. Vul het naspoelmiddel bij totdat het reservoir vol is. Sluit de dop en draai de machine op programma 2
- Bijvullen zeep. Open de nieuwe jerrycan met de daarvoor bestemde sleutel. Draai de dop van de lege jerrycan af en hang de slang in de volle jerrycan. Draai de dop met de slangen goed vast en herplaats de volle jerrycan. Leg altijd de dop die van de volle jerrycan afgedraaid hebt aan een kant onder de jerrycan zodat deze enigszins schuin staat naar het uiteinde van de slangen