

Naaldcontainers voor scherp afval

Wanneer

- Bij iedere handeling waarbij sprake is van scherpe voorwerpen die met bloed besmet zijn (naalden, mesjes, lancetten, scalpels etc).

Gebruik van de naaldencontainer

- Monteer de deksel op naaldencontainer en controleer of de deksel en beker rondom goed aansluiten.
- Vul de container niet verder dan de maximale vulstreep.
- Schud de volle container niet om ruimte te creëren.
- Gebruik de inkepingen in het deksel voor het scheiden van naald en spuit.
- Verwijder naalden niet handmatig van de spuiten.
- Houd de container rechtop gedurende gebruik.

Plaats

- Er is een toegenomen kans op accidenten wanneer men de gebruikte naalden en andere scherpe voorwerpen over een lang traject moet vervoeren. Daarom dient een naaldcontainer altijd binnen handbereik aanwezig te zijn.

Afvoeren van volle naaldencontainers

- Sluit de volle naaldencontainer zodanig af dat deze niet te heropenen is.
- Breng de naaldencontainer naar 2Z72, op de deur staat Vuilstation. De 2Z72 is in de 2e gang naast de ster (gang naast toiletten).

Nieuwe naaldcontainers

- Nieuwe naaldcontainers liggen in voorraad kast 30.